

MTB

Bilancia digitale

Manuale d'istruzione


(Revision A1, Sept 2013)

(P.N. 7.00.6.6.0263 - Revision A1, September 2013)

1. DIAGRAMMA DELL'INSTALLAZIONE

- Vassoio della bilancia
- Tasti di funzionamento
- Viti di sostegno
- Piattaforma per pesatura
- Piattaforma della bilancia
- Display digitale
- Comparto delle batterie

1. Installation diagram

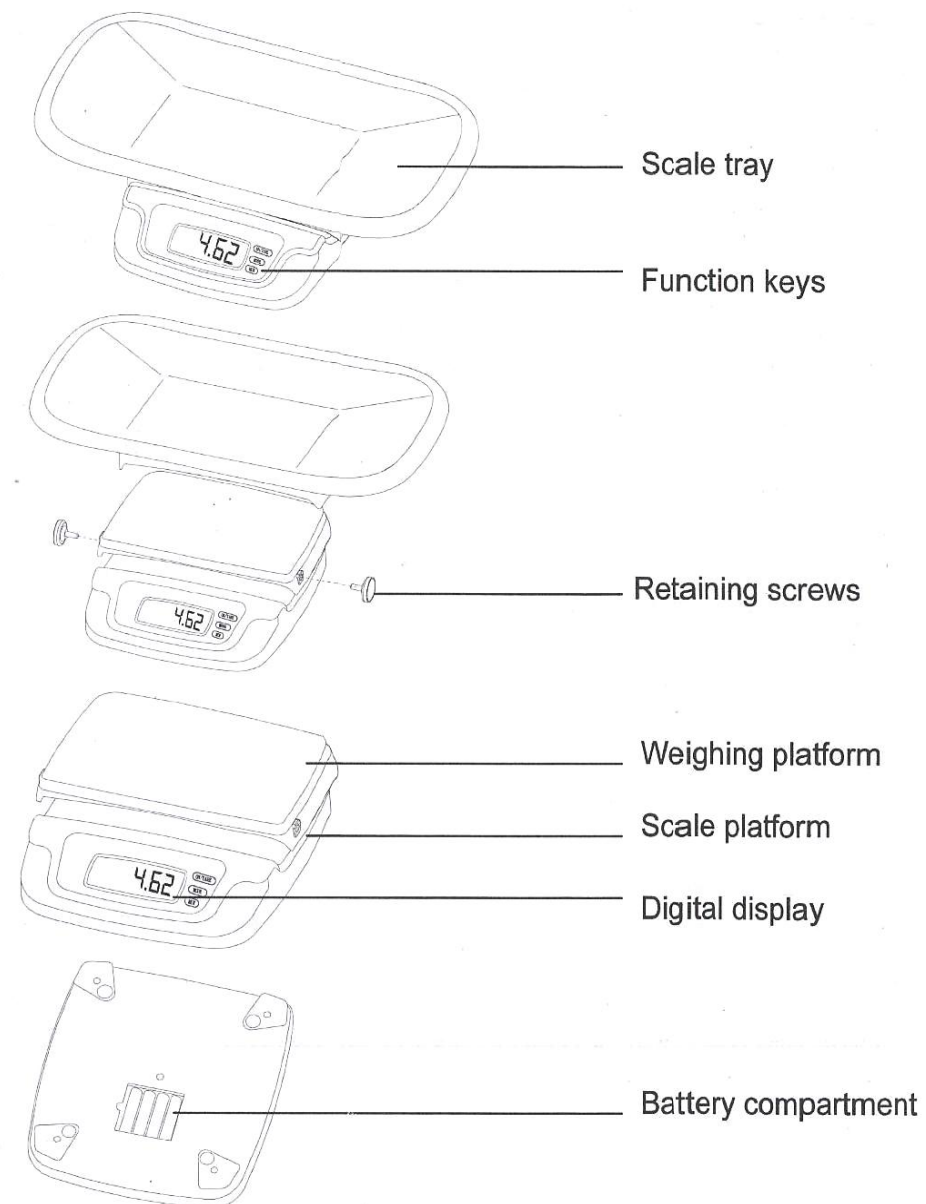

SPECIFICAZIONI

Capacità (massima)	20 kg	44 lb	
Precisione	0.005 kg	0.005 lb	
Unità di peso	kg	and	lb
Alimentazione	6V, 500mA DC adattore		
Batterie	4 x AA		
Misura del piatto	560 x 285 mm (22" x 11.2")		
Misura totale (lx p x alt.)	560 x 350 x 175 mm (22" x 13.75" x 7.0")		
Peso netto	3.2 kg (7 lb.)		

FUNZIONAMENTO

Installare le batterie, garantendo che la polarità sia come mostrato nel vano delle batterie, oppure di inserire la spina dell'adattatore di corrente nella presa sul retro della bilancia e accendere.

Posizionare la bilancia su una superficie piana e stabile e sgombrare la piattaforma.

Premere il tasto **[ON/ZERO]** per attivare la bilancia.

Il display mosterà 0,000 kg o 0,000 lb. secondo l'ultima unità di pesatura scelta.

La bilancia è ora pronta per pesare.

Mettere il soggetto sulla piattaforma più centralmente possibile. Il display mostra il peso. Una volta che la lettura è stabile, il display lampeggia.

Premere il tasto **[ON/ZERO]** brevemente per tarare la bilancia, impostando il display a 0,000 .

Qualsiasi peso supplementare aggiunto verrà visualizzato.

SELEZIONARE L'UNITÀ DI PESATURA

Premere il tasto **[MODE]** per passare da kg o libbre o viceversa. .

Il display visualizza l'unità di pesatura scelta.

MEMORIZZARE IL PESO

Per memorizzare il peso visualizzato, premere il tasto **[MEM]** quando il display LCD lampeggia.

RICHIAMARE IL PESO MEMORIZZATO

Per richiamare il peso memorizzato, premere il tasto **[MEM]** quando il display LCD è a zero

Premere il tasto una seconda volta per tornare alla pesatura.

Disattivare la bilancia.

Premere e tenere premuto il tasto **[ON/ZERO]**

La bilancia si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti se non viene utilizzata.

CALIBRATURA

Posare la bilancia su una superficie piana e stabile e sgombrare la piattaforma.

Quando la bilancia è spenta premere il tasto **[MODE]**, quindi premere il tasto **[ON/ZERO]**. Tenere premuti entrambi i tasti fino a quando il display mostra "CAL" quindi rilasciare entrambi i tasti.

Il display visualizzerà il numero che rappresenta il conteggio interno

Premete **[ON/ZERO]** brevemente.

Il display mosterà "C10" e quindi " 0 ".

Posizionare un peso di 10kg sulla piattaforma.

Il display visualizzerà un numero.

Premere il tasto **[ON/ZERO]**.

Il display lampeggerà "C20" e quindi mosterà " 0000 ".

Premere il tasto **[ON/ZERO]** ancora una volta, il display visualizzerà "End" (Fine) e quindi si spegnerà.

La calibratura è completa.

Rimuovere il peso di 10kg dalla piattaforma e accendere la bilancia.

Posizionare il peso di 10kg sulla bilancia, si dovrebbe visualizzare 10.000 kg ± 0.010 kg. Se non si è entro valori accettabili ripetere la calibrazione.

ATTENZIONE:

"Lo": Potenza bassa, si prega di cambiare le batterie.

"O": il sovraccarico (>23 kg, 50 kg), si prega di rimuovere immediatamente l'oggetto per proteggere la bilancia.

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA